

**Multi-Gyn
Vaginal Douche
NL**

karo

Reason for change: Address change to KHAB
Correction date: 09-10-2024
Artworker: MiFo

Proof version
3

Print version
X

COM code: COM-6891-01
Artwork No: 2004623_1
Previous Artwork No: TBNL130I_4
SKU No: 1000898
CMO: Sunlife
CMO code: -
EAN No: -
Pharma No: -
Component Type: Leaflet
Language: Dutch

Dimensions (WxH): 200 x 280 mm
Material: -
Machine Drawing ID: -
Font: Noi Grotesk
Minimum Point Size: 6 pt
Print Process: -


Print Colours: Colourmatch to Pantone Matching System.



Finishes.

-

Technical (Non Printing).

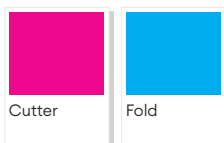

OVERPRINT PREVIEW **NO**

Karo Healthcare AB owns this artwork and is not responsible for any changes made by the CMO/printing house. Changes must be communicated with us and we will supply a new print PDF file. Both CMO and printing house are responsible for the printed end result to match the intended colours.

Multi-Gyn® Vaginal Douche



LEES DIT INFORMATIEBLAD VOORDAT U DE MULTI-GYN VAGINALE DOUCHE EN BRUISTABLETTEN GEBRUIKT EN BEWAAR VOOR NASLAG.

Multi-Gyn Vaginale Douche voor optimale hygiëne van de vagina

- Spoelt schoon op efficiënte en milde wijze
- Inwendig ventiel voorkomt het terug opzuigen van de vloeistof, vermindert opgebouwde druk en creëert een ideaal spoeeffect
- Ergonomisch design, geschikt voor verschillende houdingen

Indicatie


Onze intieme gezondheid heeft af en toe wat extra liefde en aandacht nodig. Multi-Gyn Vaginale Douche en Bruistabletten zijn ideaal voor algemene vaginale verzorging. Ook fijn in geval van ongemakken, zoals overmatige of onaangenaam geurende afscheiding, jeuk, irritatie of een brandend gevoel.

Dit product is niet bedoeld als behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's).


Gebruiksaanwijzing

De Multi-Gyn Vaginale Douche is ontworpen voor comfort, waardoor u alleen maar een prettige houding aan hoeft te nemen. Onze tip: gebruik het boven een toilet, bad of douche, zodat de spoeling makkelijk weg kan vloeien. Gebruik de Multi-Gyn Bruistabletten voor de ideale douchevloeistof.


Gebruik de Multi-Gyn Vaginale Douche zoals aangegeven:

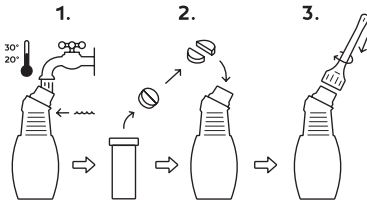

1. Vul de Multi-Gyn Vaginale Douche met lauwwarm water tot aan de bovenkant van de ribbels.
2. Breek een Multi-Gyn Bruistablet in tweeën en voeg deze toe aan het water.
3. Draai de applicator op de flacon en wacht tot de Multi-Gyn Bruistablet is uitgebruist.

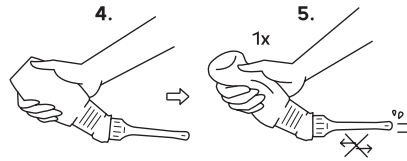

4. Breng de applicator voorzichtig aan in de vagina.
5. Knijp in de flacon om de vagina met douchevloeistof te spoelen. Het is normaal dat er vloeistof overblijft (vrijwel de halve flacon).*

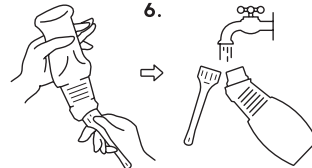

6. Haal de applicator van de flacon en spoel beide grondig schoon met warm water. Laat aan de lucht drogen (bij voorkeur op een droge plek).

* De hoeveelheid vloeistof is genoeg om de vagina te spoelen. Wilt u nog een keer spoelen met de overgebleven vloeistof, schroef de applicator van de flacon, zodat de flacon zijn originele vorm terugkrijgt en ga verder vanaf stap 4.

Let op!

- Neem altijd contact op met een arts bij blijvende of terugkerende vaginale klachten
- De Multi-Gyn Vaginale Douche is geen voorbehoedsmiddel
- Leg de Multi-Gyn Vaginale Douche nooit in kokend water en reinig het ook niet met kokend water. Het zal onherstelbaar gaan vervormen
- Bewaar Multi-Gyn Bruistabletten in de originele verpakking op een droge plek

Multi-Gyn Vaginale Douche en zwangerschap

Als u zwanger probeert te raken, adviseren wij om de Multi-Gyn Vaginale Douche niet te gebruiken tot 3 dagen na de seksuele gemeenschap. Er zijn geen bekende contra-indicaties voor het gebruik van Multi-Gyn Vaginale Douche of Multi-Gyn Bruistabletten tijdens de zwangerschap of borstvoeding. We adviseren echter altijd om contact op te nemen met uw huisarts als u zwanger bent.

Multi-Gyn® Tablets

Multi-Gyn Bruistabletten zorgen voor een natuurlijke en milde douchevloeistof voor optimale vaginale hygiëne

- Eén bruistablet is genoeg voor een flacon douchevloeistof
- Natuurlijke ingrediënten, zonder parfum
- Gecombineerd met de Multi-Gyn Vaginale Douche zorgen de Multi-Gyn Bruistabletten voor optimale vaginale hygiëne

Milde vaginale douchetabletten met natuurlijke ingrediënten

Multi-Gyn Bruistabletten, opgelost in warm lauwwarm water, creëren een milde douchevloeistof geschikt voor de Multi-Gyn Vaginale Douche. De geconcentreerde bruistabletten bevatten natuurlijke ingrediënten.

Ingredients

Lactose, Citric Acid, Sodium Bicarbonate, Lactic Acid, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Ascorbic Acid

Hoofdingrediënt 2QR-complex poeder: gezuiverd uit Aloe Barbadensis bladextract.

Multi-Gyn Tabletten bevatten natuurlijke ingrediënten en zijn parfumvrij. De tabletten zien er korrelig uit en kunnen een beetje van kleur verschillen. Deze kleine variaties hebben te maken met de natuurlijke eigenschappen van het belangrijkste actieve ingrediënt, 2QR-complex. Ze hebben geen invloed op de werkzaamheid of veiligheid van het product.

Bewaren

Buiten zicht en bereik van kinderen houden. Het is aan te raden de Multi-Gyn Bruistabletten in hun originele verpakking op een droge plek te bewaren bij een temperatuur tussen de 10°C en 25°C (kamertemperatuur).

De bruistabletten zijn niet bedoeld voor oraal gebruik.

Karo Healthcare AB
Box 16184, SE-103 24 Stockholm,
Sweden

APPROVED by michel.fonville on 30-Oct-2024 17:03.

Username	Full Name	Status	Date/Time (UTC)
jasmine.vinnfall	Jasmine Vinnfall	Approved	10-Oct-2024 12:43
charlotte.dhont	charlotte dhont	Approved	11-Oct-2024 13:35
phil.hinckley	Phil Hinckley	Approved	30-Oct-2024 14:14
phil.hinckley	Phil Hinckley	Approved	30-Oct-2024 14:14