

PRIEŠ „MULTI-GYN LIQUIGEL” NAUDOMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ NAUDOMO INSTRUKCIJĄ IR PASILIKITE JĄ, JEI VĖL PRIREIKTU JĄ PERSKAITYTI.

„Multi-Gyn LiquiGel” gydo ir sumažina maksties gleivinės išsausėjimą:

- labai greitai sumažina maksties gleivinės išsausėjimą;
- apsaugo makštį nuo sudirginimo lytinų santykų metu;
- palaiko natūralū maksties drėgnumą;
- gelio pagrindą sudaro natūralios sudedamosios dalys;
- sudėtyje nėra hormonų.

Indikacijos

„Multi-Gyn LiquiGel” idealiai tinka maksties gleivinės išsausėjimui mažinti. Maksties gleivinės išsausėjimas gali pasireikšti dėl daugybės priežasčių, išskaitant hormoninius pokyčius (pvz., menopauzę, gimdymą ar žindymą), gydymą vaistais ir stresą. „Multi-Gyn LiquiGel” labai greitai sumažina su maksties išsausėjimu susijusį dirginimą ir diskomfortą. Gelsis palaiko natūralū maksties drėgnumą, taip padedamas sumažinti dirginimą ir apsaugodamas nuo maksties išsausėjimo. „Multi-Gyn LiquiGel” neturi poveikio maksties mikroflorai ir gali būti naudojamas lytinų santykų metu natūraliam maksties drėgnumui palaikti.

Kaip veikia „Multi-Gyn LiquiGel”?

„Multi-Gyn LiquiGel” yra natūralus gelis, kurio pagrindas – patentuotas **2QR*** kompleksas. Tai saugus ir veiksmingas drėkinamasis gelis. „Multi-Gyn LiquiGel” suformuoja linijinę plėvelę ant maksties sienelių ilgai trunkančiam drėkinimui užtinkrinti ir natūraliai maksties mikroflorai palaikti. Reguliariai naudojant „Multi-Gyn LiquiGel”, sumažeja maksties išsausėjimo sukeliamas dirginimas. „Multi-Gyn LiquiGel” palaiko natūralū maksties drėgnumą lytinų santykų metu. Švelnusas poveikis gelio pagrindą sudaro natūralios medžiagos, gelio sudėtyje nėra hormonų.

Naudojimo nurodymai

Maksties išsausėjimui mažinti tepkit makštį pakankamu „Multi-Gyn LiquiGel” kiekiu mažiausiai vieną kartą per dieną arba pagal poreikių siekiant sumažinti nemalonumus pojūčius. Jeigu negalavate išsiekti arba kartojasi, turėtumėte kreiptis į savo gydytoją.

„Multi-Gyn LiquiGel” neturėtumėte naudoti ilgiau kaip 30 dienų iš eilių, kad maksties mikroflora galėtų atkurti pusiausvyrą be pagalbinų priemonių.

Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite visas tolesnes likusioje šio lapelio dalyje esančias instrukcijas.

Prašome atkrepti dėmesį!

Po naudojimo galite jauti deginimui ir (arba) dilgčiojimui. Tai normalu, pojūtis greitai prieis.


„Multi-Gyn LiquiGel” pagrindą sudaro natūralios sudedamosios dalys

„Multi-Gyn LiquiGel” pagrindą sudaro biologiskai aktyvus **2QR*** kompleksas. Gelio sudėtyje nėra kvapiuju medžiagų, hormonų ir gyvūninės kilmės medžiagų.

Kaip „Multi-Gyn LiquiGel” naudoti išorėje ir į maksties vidų

• Naudojimas išorėje

Esant išsausėjimui išorinių lytinų organų (vulvos) srityje, „Multi-Gyn LiquiGel” galite užtepti pirštu. Priė patepimą geliu ir po jo visada nusiplaukite rankas.

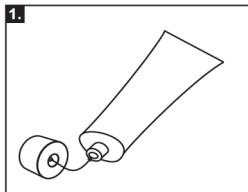

1. Atsukite tūbelės dangtelį. Prieš pirmajį naudojimą viršutinė dangtelio puse pradurkite užsandariną tūbelę.



2. Paimkite tūbelę į vieną ranką ir laikykite kitos rankos smilių priet pat tūbelės taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Lengvai suspauskite tūbelę. Spauskite tol, kol ant smilius atsisras pakankamas gelio kiekis, kaip parodyta paveikslėlyje.

Pagrindinės medžiagos, esančios sudėtyje: galaktoarabinano poligliukuronio rūgšties krosopolimeras*, glicerinas, betaines, ksantano derva.

***2QR kompleksas** – patentuoti biologiskai aktyvūs polisacharidai. www.2QR.com

Informacija apie alergines reakcijas

Padidejės jautrumas (alerģija) „Multi-Gyn LiquiGel” sudedamosioms dalims yra labai retas. Jei abejojate, patariame užtepti nedidelį kiekį gelio ant vidinės dilbio pusės odos. Jei atsiranda niečintis raudonas spuogelis ar dėmė, patariame „Multi-Gyn LiquiGel” nenaudoti.

Šalutinis poveikis

„Multi-Gyn LiquiGel” šalutinio poveikio reiškiniai nėra žinoma. Gelio pagrindas yra natūralus. „Multi-Gyn LiquiGel” – nekontraceptikas, tame nėra spermicidų. Vis dėlto gelio ištaka spermatozoidų aktyvumui nėra ištirta.

Sąveika su vaistais

Apie sąveiką su vaistais nėra žinoma.

Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėra žinomų kontraindikacijų dėl „Multi-Gyn LiquiGel” naudomo nėštumo ir žindymo metu. Aptarkite galimybes su savo gydytoju.

Naudojimas kartu su prezervatyvais ir pesarais

Nenaudokite „Multi-Gyn LiquiGel” kartu su prezervatyvais. Gelio poveikis jų naudojant kartu su pesarais nėra žinomas.

Naudojimas kartu su tamponais ir atliekant maksties praplovimus


Kartu su tamponais ir atliekant maksties praplovimus „Multi-Gyn LiquiGel” naudoti nerekomenduojama. Daliai „Multi-Gyn LiquiGel” gelio pasižalinus iš maksties, gali susilpnėti produkto poveikis.

Laikymo sąlygos


„Multi-Gyn LiquiGel” laikyti 10 °C – 25 °C (kambario) temperatūroje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pasibaigus galiojimo laiku, „Multi-Gyn LiquiGel” nenaudokite.

Medicinos priemonė

Informacijos peržiūros data: 2021-01-26

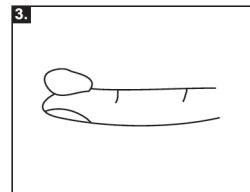

3. Gelio kiekis turėtų būti bent jau piršto galiuoko dydžio (maždaug 2 ml).

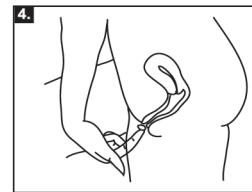


4. Geliu patepkite išorinę srityt aplink makštį.




• Naudojimas į makšties vidų


Galite naudoti specialų aplikatorių, kuris prisukamas prie tubelės (aplikatorių rasište dėžutėje). Po naudojimo aplikatorių galite palikti prisuktą ant tubelės. Nuplaukite ji šiltu vandeniu ir ant aplikatoriui uždékite dangtelį. Jei pageidaujate, galite gelį tepti pirštu. Nusiplauskite rankas ir išspauskite mažiausiai tiek gelio, kiek telpa ant Jūsų smilauši galiuko. Jveskite pirštą į makštį.

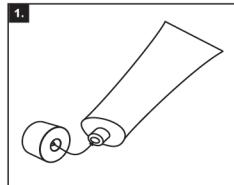


1. Atskite tubelės dangtelį. Prieš pirmajį naudojimą viršutinę dangtelio puse pradurkite užsandarinčią tubelę.

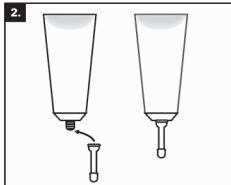


2. Prie tubelės prisukite specialų aplikatorių, kurį rasiše dėžutėje.

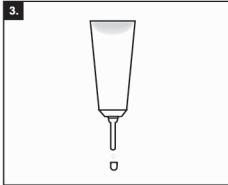


3. Nuimkite aplikatoriuius dangtelį.

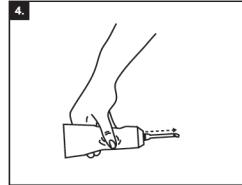


4. Į vieną ranką paimkite tubelę ir svėlniai spauskite tol, kol ant aplikatoriuius viršunėlės pasirodyss gelis. Kai ji pamatysite, bus aišku, kad aplikatoriuius prisipildė ir yra paruoštas naudoti. Patikrinkite, kiek išteka gelio lengvai paspaudus tubelę. Jums reikalingas kiekis – mažiausiai piršto galiuko dydžio (maždaug 2 ml).

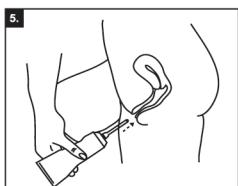


5. Jveskite ant tubelės prisuktą aplikatorių į makštį taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Norėdama palengvinti jiedimą, galite išspausti siek tiek gelio išorinėje intymioje odos srityje. Aplikatoriui yra mažesnis už makstį ir nepažeis gimbos kaklelio.

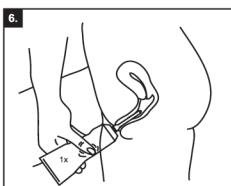

6. Lengvai paspauskite tubelę. Jums reikalingas gelio kiekis – mažiausiai piršto galiuko dydžio. Tačiau apribojimo nėra ir nekilis pavojuj, jei išspausite daugiau.

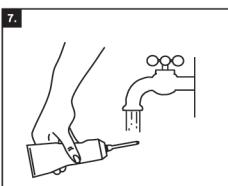

7. Po naudojimo aplikatoriui galite palikti prisuktą prie tubelės. Nuplaukite ji šiltu vandeniu.

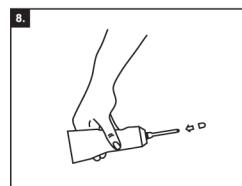

8. Ant aplikatoriuius uždékite dangtelį.

Papildoma informacija

Makštis dirginimas ir su makstis išsausėjimu susiję nemalonūs pojūčiai yra dažni ir gali kartotis. Juos patiria daugiau kaip pusė moterų įvairiais gyvenimo laikotarpiais.

Dažniausia priežastis – natūralių maksties skysčių sumažėjimas dėl hormonų pusiausvyros pokyčių, pvz., menopauzės metu arba antrojoje menstruaciniu ciklo pusėje. Be to, šią problemą gali sukelti ar ją padidinti daugybė kitų veiksnių, pvz., tam tikrų vaistų vartojimas, mūslas, tamponai, stresas, nuovargis, žindymas ir gindymas. Dauguma moterų pirmą kartą maksties išsausėjimą pastebi tada, kai lytiniai santykiai tampa nemalonūs, net skausmingi. Lytiniai santykiai, kai maksties gleivinė pakankamai nesudrėkinama natūraliaisiais skysčiais ar tam tinkamu drékinančiu produkту, tokiu kaip „Multi-Gyn LiquiGel“, gali sukelti dirginimą.

Makstis išsausėjimas gali sumažinti pasitikėjimą savimi ir sukelti bendrą nepatogumo jausmą, dėl kurio sutrikę normalus kasdienis gyvenimas.

Gamintojas:

BioClin BV, Delftechpark 55, 2628 XJ Delft, Nyderlandai, www.multi-gyn.com

Atstovas Lietuvoje:

UAB „Trimb“, el. paštas info@trimb.lt



0482

03-2020
BC122L6