

Multi-Gyn® Makšties plovimo įtaisas

Multi-Gyn®



Prieš „Multi-Gyn“ makšties plovimo įtaiso ir tablečių naudojimą atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir ją išsaugokite ateičiai.

„Multi-Gyn“ makšties plovimo įtaisas optimaliai makšties higienai palaikyti:

- Tai ergonomiškas plovimo įtaisas, kurį galima naudoti įvairiose padėtyse.
- Plauna švariai, veiksmingai ir švelniai.
- Speciali įtaiso membrana neleidžia plovimo skysčiui įsisiurbti atgal, apsaugo nuo per stiprios išspaudžiamos srovės ir sukuria idealaus praplovimo efektą.

Paskirtis:

„Multi-Gyn“ makšties plovimo įtaisas ir tabletės idealiai tinka bendrai makšties higienai palaikyti arba intensyviai makšties higienai, kai vargina gausios, nemalonaus kvapo išskyros, perštėjimas, sudirginimas ir deginimo pojūtis.

Naudojimo nurodymai

Kai kurioms moterims makšties negalavimai pasireiškia dažniau, nei kitoms, priklausomai nuo jų gyvenimo būdo, lytinio aktyvumo ar menstruacijų. Priklausomai nuo asmeninės higienos poreikio, „Multi-Gyn“ makšties plovimo įtaisą galima naudoti dažniau; vis dėlto nepatariama naudoti „Multi-Gyn“ makšties plovimo įtaiso dažniau kaip kartą per savaitę, nebent gydytojas pataria kitaip.

Jei makšties negalavimai nepraeina, kreipkitės į gydytoją.


„Multi-Gyn“ makšties plovimo įtaisą galima naudoti įvairiose pageidaujamos padėtyse. Raskite Jums patogiausią „Multi-Gyn“ makšties plovimo įtaiso naudojimo būdą. Svarbu, kad plovimo skystis galėtų lengvai ištekėti, pavyzdžiui, naudokite jį duše arba virš unitazo. Iliustruotus „Multi-Gyn“ makšties plovimo įtaiso naudojimo nurodymus rasite žemiau.

„Multi-Gyn“ makšties plovimo įtaiso naudojimas nėštumo laikotarpiu


Jei norite pastoti, patariama nenaudoti „Multi-Gyn“ makšties plovimo įtaiso bent 3 dienas po lytinio akto. „Multi-Gyn“ makšties plovimo įtaisas nėra kontracepcijos priemonė. Su „Multi-Gyn“ makšties plovimo įtaiso ar „Multi-Gyn“ tablečių naudojimu nėštumo ar žindymo laikotarpiu susijusių kontraindikacijų nėra žinoma. Vis dėlto, jeigu esate nėščia, visada patariame kreiptis į savo gydytoją.

Prašome atkreipti dėmesį!


„Multi-Gyn“ makšties plovimo įtaiso nedėkite į verdantį vandenį ir neplaukite jo verdančiu vandeniu, nes įtaisas nepataisomai deformuosis.

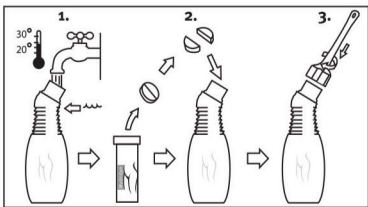

1. Užpildykite „Multi-Gyn“ makšties plovimo įtaisą drugnu vandeniu iki briaunų viršaus.
2. Perlaužkite vieną „Multi-Gyn“ tablečių ir įdėkite į vandenį.
3. Prie buteliuko prisukite aplikatorių ir palaukite, kol „Multi-Gyn“ tablečių visiškai ištirps bei nustos putoti.

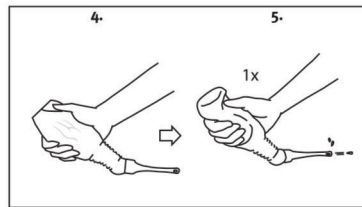

4. Švelniai įveskite aplikatorių į makštį.
5. Švelniai spustelėkite buteliuką, kad plovimo skystis praplautumėte makštį. Jeigu mažiau nei pusė buteliuko skysčio lieka, tai yra normalu.*
*Skysčio kiekis yra pakankamas makščiai praskalauti. Jei norite vėl praskalauti su likusiu skysčiu, prisukite aplikatorių prie buteliuko taip, kad buteliukas vėl būtų pradinės formos, ir tęskite nuo 4 žingsnio.

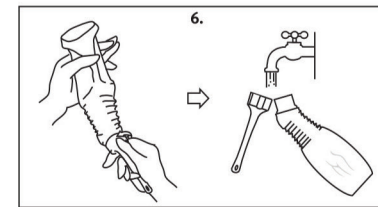

6. Nuimkite aplikatorių nuo įtaiso ir kruopščiai išplaukite šiltu vandeniu. Leiskite natūraliai išdžiūti (pageidautina, sausoje vietoje).

Multi-Gyn® Tabletės plovimo skysčiui

Multi-Gyn®



Naudojant „Multi-Gyn“ tabletes, pagaminamas natūralus ir švelniai plaunantis skystis, skirtas optimaliai intymiai higienai palaikyti

- Vienos tabletės pakanka vienam buteliukui plovimo skysčio.
- Sudėtyje yra natūralių medžiagų, nėra kvapiųjų medžiagų.
- Kartu su „Multi-Gyn“ plovimo įtaisu naudojamos tabletės padeda palaikyti optimalią intymią higieną.

Švelniam plovimui skirtos tabletės su natūraliomis medžiagomis

Drugname vandenyje ištirpinus „Multi-Gyn“ tabletes, sukuriamas švelniai plaunantis skystis, tinkamas naudoti kartu su „Multi-Gyn“ plovimo įtaisu. Koncentruotų putojančių tablečių sudėtyje yra natūralių medžiagų.

INGREDIENTS: Lactose, Citric Acid, Sodium Bicarbonate, Lactic Acid, Aloe Barbadensis Leaf Polysaccharides, Ascorbic Acid.

Pagrindinė aktyvioji 2QR komplekso miltelių sudedamoji dalis:

Patentuoti biologiškai aktyvūs polisacharidai, išgryninti iš tikrojo alavijo (*Aloe Barbadensis*) lapų ekstrakto.

Tabletės yra nelygaus paviršiaus ir jų spalvos gali šiek tiek skirtis. Šie nedideli skirtumai yra susiję su pagrindinės aktyviosios sudedamosios dalies – 2QR komplekso – natūraliomis savybėmis. Jie neturi įtakos produkto veiksmingumui ar saugumui.

Laikymo sąlygos

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. „Multi-Gyn“ tabletes patariama laikyti originalioje tūbelėje, sausoje vietoje, 10 °C – 25 °C (kambario) temperatūroje.