

MULTI-GYN INTISKIN SPREI 40ml

Leevendab intiimpiirkonna naha sügelust ja ärritust. Kasutage Multi-Gyn Intiskin'i raseerimisest/vahatamisest, hügieenisidemetest, pesukaitsetest, tualettpaberist, seebist, spordist, seksuaalvahekorrast jne. tingitud sügeluse, ärrituse ja põletustunde rahustamiseks intiimpiirkonnas.

Kasutamine: kasutage vähemalt 2 kuni 3 korda päevas või vastavalt vajadusele. Pihustage lühidalt üks või kaks korda kahjustatud piirkonnale. Võib pihustada mistahes nurga alt, isegi külli või pudeli põhi ülespoole. Enne kasutamist loksutage korralikult!

* KIIRE LEEVENDUS EBAMUGAVUSTUNDELE INTIIMPIIRKONNA NAHAL

* LEEVENDAB SÜGELUST, ÄRRITUST JA PÕLETUSTUNNET

* OPTIMEERIB INTIIMPIIRKONNA NAHA SEISUNDIT

* MEELDIVA JAHUTAVA TOIMEGA

* KÕRVALDAB EBAMEELDIVA LÕHNA JA ANNAB VÄRSKE TUNDE

Koostisained: Galactoarabinan Polyglucuronic Acid Crosspolymer*, niisutaja, naha hooldajad, rahustav aine, lõhna neutraliseerija. ***2QR-kompleks**, patenteeritud bioaktiivsed polüsahhariidid.

Ettevaatust! Pudeli on rõhu all. Kuumutamisel võib lõhkeda.

Hoida eemal kuumusest, kuumadest pindadest, sädemetest, lahtisest leegist ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

Tühja pudelit ei tohi läbi toigata ega põletada isegi pärast kasutamist. Kaitsta otsese päikesevalguse eest ja mitte hoida

temperatuuri üle 50°C. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Säilitamine: vt tingimärke pakendil. **Pakend:** 40 ml.

Partii ja kõlblikkusaeg: vt pudeli põhja alt.

Tootja: BioClin BV, Delftechpark 55, 2628 XJ, Delft, Holland.

Täiendav teave: BetaMed OU. info@betamed.ee BC190E.3/et

60407