

Multi-Gyn® Vaginal Douche

Multi-Gyn®



ENNE MULTI-GYN VAGINAL DOUCHE JA TABLETTIDE KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT INFOLEHTE. HOIDKE INFOLEHT ALLES, ET SEDA VAJADUSEL UUESTI LUGEDA.

MULTI-GYN VAGINAL DOUCHE OPTIMAALSEKS TUPE HÜGIEENIKS

- Loputab puhtaks tõhusalt ja õrnalt
- Spetsiaalne klapp väldib vedeliku tagasivoolu, vähendab rõhu tõusu ning loob ideaalse loputusefekti
- Ergonoomiline loputusseade, mida saab kasutada erinevates asendites

KASUTAMINE

Multi-Gyn Vaginal Douche ja tabletid on ideaalsed tupe üldiseks hügieeniks. Samuti tupe intensiivseks hügieeniks liigse või ebameeldiva lõhnaga vooluse, sügeluse, ärrituse ning põletustunde korral.

KASUTAMISJUHEND

Mõned naised on elustiili, seksuaalse aktiivsuse või menstruatsiooni tõttu vaginaalsele ebamugavustundele teistest vastuvõtlikumad. Olenevalt isikliku hügieeni vajadusest võib Multi-Gyn Vaginal Douche'i kasutada sagedamini, siiski ei ole Multi-Gyn Vaginal Douche'i kasutamine üle ühe korra nädalas ilma arsti teistsuguse nõuandeta soovitatav.

Kui vaginaalsed vaevused püsivad, kontakteeruge alati arstiga.

Multi-Gyn Vaginal Douche'i saab kasutada mitmes sobivas asendis. Leidke endale kõige mugavam viis Multi-Gyn Vaginal Douche'i kasutamiseks. On oluline, et loputusvedelik saaks kergesti välja voolata, nt duši all või tualettpoti kohal. Multi-Gyn Vaginal Douche'i kasutamisel palume jälgida alljärgnevat illustreeritud juhendit.


MULTI-GYN VAGINAL DOUCHE JA RASEDUS

Rasestumise soovi korral soovitame Multi-Gyn Vaginal Douche'i mitte kasutada vähemalt 3 päeva jooksul pärast seksuaalvahekorda. Multi-Gyn Vaginal Douche ei ole rasestumisvastane vahend.


Ei ole teadaolevaid vastunäidustusi Multi-Gyn Vaginal Douche'i kasutamiseks raseduse või imetamise ajal. Siiski soovitame me raseduse korral alati arstiga nõu pidada.

TÄHELEPANU!

Ärge kunagi asetage Multi-Gyn Vaginal Douche'i keevasse vette ega puhastage seda keeva veega. See põhjustab seadme deformeerumise, mida ei saa taastada.

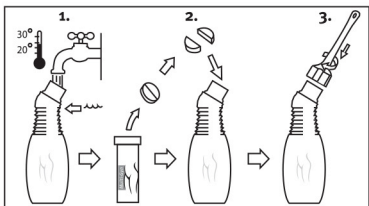


- 1 - Täitke Multi-Gyn Vaginal Douche'i pudel leige veega pudeli volditud osa ülemise ääreni.
- 2 - Poolitage Multi-Gyn tablett ja asetage tablett vette.
- 3 - Kinnitage aplikaator pudelile ja oodake kuni Multi-Gyn tablett on täiesti lahustunud ning ei kihise enam.

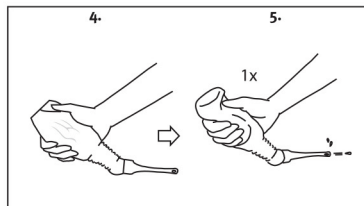

- 4 - Viige aplikaator ettevaatlikult tuppe.
- 5 - Tupe puhastamiseks loputusvedelikuga pigistage pudelit.

On normaalne, kui vedelikku (kuni pool pudelit) jääb pudelisse*.
* See vedelikukogus on tupeloputuseks piisav. Kui soovite allesjäänud vedelikuga veelkord loputada, siis keerake korra aplikaator pudelilt, et pudel võtaks taas oma loomuliku kuju. Jätake sammust 4.

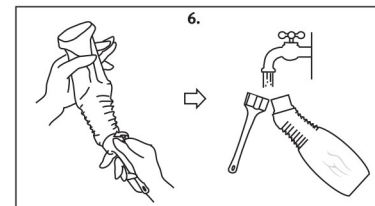

- 6 - Eraldage aplikaator pudelist ning loputage korralikult sooja veega. Jätke loomuliku kuivama (eelistavalt kuiva kohta).



MULTI-GYN TABLETID LOOVAD OPTIMAALSEKS TUPEHÜGIEENIKS NATURAALSE JA ÕRNA LOPUTUSVEDELIKU

- Ühe pudelitäie tupeloputusvedeliku valmistamiseks piisab ühest tabletest
- Sisaldab looduslikke koostisaineid ilma lõhnaaineteta
- Kombinatsioonis Multi-Gyn Vaginal Douche'ga pakuvad need tabletid optimaalset tupehügieeni

ÕRN TUPELOPUTUS NATURAALSETE KOOSTISAINETEGA

Leiges vees lahustatud Multi-Gyn tabletid loovad õrna loputusvedeliku, soovitatav kasutamiseks koos Multi-Gyn Vaginal Douche'ga. Kontsentreeritud lahustuvad tabletid sisaldavad looduslikke koostisaineid.

INGREDIENTS:

Lactose, Citric Acid, Sodium Bicarbonate, Lactic Acid, Aloe Barbardensis Leaf Polysaccharides, Ascorbic Acid.

Peamine aktiivne koostisaine 2QR-kompleksi pulber:

Patenteeritud bioaktiivsed polüsahhariidid Aloe Barbardensis lehtede ekstraktist.

Need tabletid on teralise välimusega ja võivad värvuselt veidi varieeruda. Need väikesed variatsioonid on seotud peamise koostisaine, 2QR-kompleksi, looduslike omadustega. Need ei avalda mõju toote tõhususele ega ohutusele.

SÄILITAMINE

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Multi-Gyn tablette on soovitatav hoida originaalpuubis, kuivas, toatemperatuuril 10°C kuni 25°C.