



Multi-Gyn FloraPlus - ārstē maksts mikrofloras problēmas.

- + mazina niezi, kairinājumu, nepatīkamu aromātu un baltus izdalījumus
- + satur prebiotikas
- + ideāls pH veselai maksts mikroflorai
- + satur dabīgas sastāvdaļas

Indikācijas:

Sievietēm, kuras cieš no nepatīkamiem simptomiem, ko rada maksts sēnīte. Multi-Gyn FloraPlus efektīvi ārstē maksts sēnīti un ar to saistīto diskomfortu, kā, piemēram, niezi, kairinājumu, smaku un baltus izdalījumus. Nenovērš seksuāli transmisīvās slimības.

Kā darbojas Multi-Gyn FloraPlus

Multi-Gyn FloraPlus ir dabīgs produkts, kas balstīts uz patentētu bio-aktīvu 2QR- kompleksu kombinācijā ar prebiotiskiem 2QR kompleksu ir dabīga no augiem iegūta substance, kam piemīt unikāla spēja bloķēt saķeri maksts ādai un gļotādai ar kaitīgām baktērijām un sēnītēm. Sliktie mikroorganismi tiek droši neitralizēti. Tai pat laikā prebiotikas veicina laktobaktēriju vairošanos, kas atjauno dabisko maksts mikrofloru.

Unikālā Multi-Gyn FloraPlus kombinācija efektīvi novērš maksts sēnīte izraisītās problēmas un atjauno maksts mikrofloru.

Kad lietot Multi-Gyn FloraPlus

- Vaginālās sēnītes problēmu mazināšanai - lietot vienu devu tieši pirms gulētiešanas, 5 dienas pēc kārtas
- Ja sūdzības nepāriet vai atjaunojas, kontaktējieties ar ārstu.
- Multi - Gyn FloraPlus nevajadzētu lietot ilgāk par 30 dienām vienā ārstēšanas periodā. Tas nodrošinātu, ka maksts mikroflora spēj pati sevi regulēt.

Ievēribai!

Pēc lietošanas var rasties dedzinoša un/vai kairinoša sajūta. Tas ir normāli un tā ātri pāries.

Satur dabīgas sastāvdaļas

Multi-Gyn Flora Plus nesatur hormonus, augu izcelsmes sastāvdaļas vai smarzvielas

Galvenās sastāvdaļas

gataktoarabiāna poliglikuroniskābe, prebiotikas, 2QR komplekss: patentēts bio-aktīvs polisaharīds

Informācija par alerģiju

Multi-Gyn Flora Plus sastāvs reti izraisa alerģiju. Ja Jums ir šaubas, pamēģiniet uzklāt nelielu daudzumu uz rokas iekšpusi. Ja rodas neloģisks sarkans plankums, nelietojiet Multi-Gyn Flora Plus.

Iespējamās blakusparādības

Multi-Gyn FloraPlus rada optimālu vaginālo skābumu, sperma ir sārmaina, tādēļ Multi-Gyn FloraPlus lietošanas laikā var mazināties spermas aktivitāte. Tāpēc neiesakām lietot vairākas stundas pēc dzimumsakara, ja vēlaties grūtniecības iestāšanos.

Mijiedarbība ar citiem medikamentiem

Multi-Gyn FloraPlus nav mijiedarbības ar citiem medikamentiem.

Grūtniecība un krūts barošana

Multi-Gyn FloraPlus nav zināmu kontraindikāciju grūtniecības un krūts - barošanas periodā.

Lietošana ar prezervatīviem un pesārijiem
Ieteikme uz Multi-Gyn Flora Plus lietojot ar prezervatīviem un pesārijiem nav zināma.

Lietošana ar prezervatīviem un pesārijiem

Ieteikme uz Multi-Gyn Flora Plus lietojot ar prezervatīviem un pesārijiem nav zināma.

Uzglabāšana


Temperatūra zemāka par 10°C un augstāka par 25°C nav vēlama. Ieteicama istabas temperatūrā. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām.

Vispārīgā informācija


Veselā maksts ir dažādu maksts baktēriju līdzsvars. Kad tiek traucēta maksts dabiskā vide vai pH, kaitīgas baktērijas un mikrobi var savairoties. Šis līdzsvara izmaiņas parasti izpaužas kā izmaiņas maksts izdalījumos. Visbiežāk rodas baktēriālā vaginoze (B.V.) un maksts rauga problēmas (candida vai piena sēnīte). Vaginoze ir bieži saistīta ar nepatīkamu aromātu, bet rauga sēnīte papildus rada niezi, dedzinošu sajūtu un izdalījumus.

Lietošana


MultiGyn Flora Plus ir vagināls gēls, kas satur prebiotikas. Gēls ir jāievada makstī. Katra tūbiņa satur vienu devu. Tā jāievada makstī, izmantojot aplikatoru, kas ir īpaši pielāgots makstij un atrodas tūbiņas galā. Pēc iztukšošanas izlietoto tūbiņu izmetiet

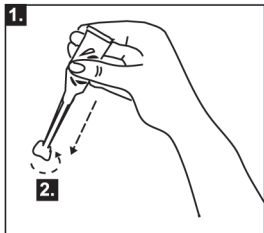


1. Satveriet tūbiņu, kā attēlots zīmējumā. Sakratiet tūbiņas saturu.
2. Pagriežot aplikatora galu, nolauziet to.

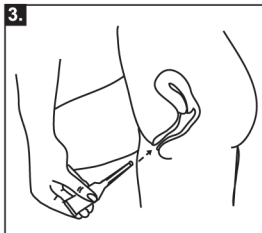

3. Maigi ievadiet aplikatoru makstī.

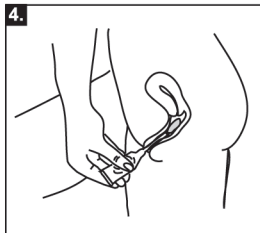

4. Maigi spiežot tūbiņu, ievadiet visu tūbiņas saturu (gēlu) makstī.

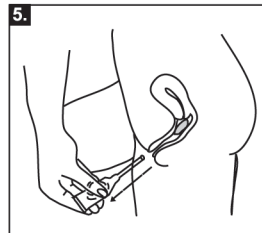

5. Turpiniet spiest tūbiņu arī izvelkot to no maksts.

Piezīme. Ievērojiet, ka ir aprēķināts pietiekošs devas lielums, kas tiek ievadīts makstī. Neliels daudzums gēla vienmēr paliks tūbiņā.



Ražotājs: BioClin BV, Delftechpark 55, 2628 XJ Delft, Nederlande
Importētājs: UAB „Trimb”, Lietuva, e-pasts info@trimb.lt