

Multi-Gyn® baloniņš maksts skalošanai

Multi-Gyn®



PIRMS MULTI-GYN VAGINAL DOUCHE UN TABLETES LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU UN UZGLABĪJIET TO TURPMĀKIEM JAUTĀJUMIEM.

Multi-Gyn baloniņš maksts skalošanai optimālai maksts higiēnai

- Izskalo tīri, efektīvi un maigi
- Īpašs vārsts, kas pasargā no šķidruma atplūdes atpakaļ. Pasargā no spiediena uzkrāšanās un rada ideālu skalošanu efektu
- Ergonomiska ierīce, ko var izmantot dažādās pozīcijās

INDIKĀCIJAS

Multi-Gyn Vaginal Douche un tabletes ir ideāli piemērotas vispārējai maksts higiēnai vai arī īpašai maksts higiēnai, kad ir pārmērīga vai nepatīkama izdalījumu smarža, kā arī niezes, kairinājuma un dedzinošas sajūtas gadījumā.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Dažas sievietes dzīvesveida, dzimumaktivitātes vai menstruāciju dēļ ir vairāk pakļautas maksts diskomfortam. Atkarībā no personīgās higiēnas vajadzībām Multi-Gyn Vaginal Douche var lietot biežāk; tomēr nav ieteicams lietot Multi-Gyn Vaginal Douche biežāk kā reizi nedēļā, ja vien ārsts nav ieteicis citādi.

Vienmēr sazinieties ar ārstu, ja maksts sūdzības turpinās.

Multi-Gyn baloniņu var izmantot vairākās sev ērtās pozās. Atrodiet sev ērtāko veidu kā izmantot Multi-Gyn. Ir svarīgi, lai skalošanas šķidrums varētu viegli izplūst. Piemēram, duša vai virs tualetes poda.


Lūdzu, skatiet ilustrētos Multi-Gyn maksts dušas lietošanas norādījumus.

Maksts skalošana ar Multi-Gyn ierīci un grūtniecība.


Ja vēlaties grūtniecību, mēs iesakām nelietot Multi-Gyn maksts skalošanas līdzekli līdz 3 dienām pēc dzimumakta. Multi-Gyn maksts dušas ierīce nav kontracepcijas līdzeklis. Nav zināmu kontraindikāciju Multi-Gyn Vaginal Douche vai Multi-Gyn tablešu lietošanai grūtniecības vai zīdīšanas laikā. Tomēr mēs vienmēr iesakiet sazināties ar ārstu, ja esat grūtniece.

Lūdzu ņemiet vērā!

Nekad neievietojiet vai nemazgājiet Multi-Gyn baloniņu verdošā ūdenī. Tas neatgriezeniski tiks deformēts.

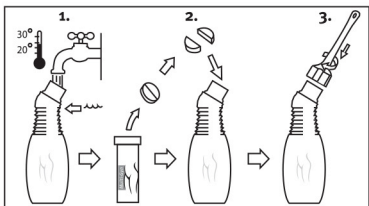


1. Piepildiet Multi-Gyn baloniņu ar remdenu ūdeni līdz rievotās daļas augšai.
2. Pārdaliet uz pusēm vienu Multi-Gyn tableti un pievienojiet to ūdenim.
3. Balonam uzskrūvējiet aplikatoru, pagaidiet līdz tablete ir pilnībā izšķīdusi un beidz putot.

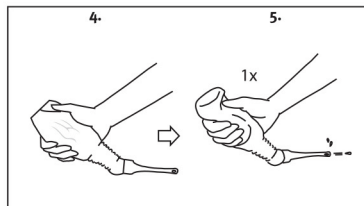

4. Maigi ievadiet balona uzgali maksti.
5. Saspiediet baloniņu, lai šķidrums izskalo maksti. Tas ir normāli, ja daļa no šķidruma (puse pudeles satura) paliek pudelē.*

*Šķidruma daudzums ir pietiekams, lai izskalotu maksti. Ja vēlaties skalot atkārtoti ar atlikušo šķidrumu, atskrūvējiet aplikatoru, lai pudele atgrieztos sākotnējā formā, turpiniet kā norādīts 4. solī.

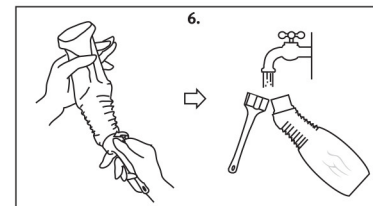

6. Atdaliet pudeli no aplikatora un vienmērīgi izskalojiet ar siltu ūdeni. Atstājiet to nožūt dabiski (ieteicams sausā vietā).



MULTI-GYN TABLETES RADA DABISKU UN MAIGU ŠĶĪDUMU SKALOŠANAI OPTIMĀLAI VAGINĀLAI HIGIĒNAI

- Viena tablete paredzēta, lai sagatavotu vienu pudeli ar šķīdumu skalošanai
- Satur dabīgas sastāvdaļas un nesatur smaržvielas
- Kopā ar Multi-Gyn Vaginal Douche, tabletes nodrošina optimālu maksts higiēnu

Droša skalošana ar dabiskām vielām

Multi-Gyn tabletes, kas izšķīdinātas siltā ūdenī, rada maigu šķīdumu, kas piemērots lietošanai ar Multi-Gyn maksts skalošanas ierīci. Koncentrētās putojošās tabletes satur dabīgas sastāvdaļas.

SASTĀVDAĻAS

Laktoze, citronskābe, nātrija bikarbonāts, pienskābe, *Aloe Barbadensis* lapu polisaharīdi, askorbīnskābe.

Galvenā aktīvā sastāvdaļa ir 2QR-kompleksa pulveris:

Patentēti bioaktīvi polisaharīdi, kas attīrīti no *Aloe Barbadensis* lapu ekstrakta.

Tabletes ir graudainas un to krāsa var nedaudz atšķirties. Šīs nelielās variācijas ir aktīvās sastāvdaļas, 2QR kompleksa, dabisko īpašību dēļ. Tie neietekmē produkta efektivitāti vai drošumu.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Multi-Gyn tabletes ieteicams turēt oriģinālajā tūbiņā sausā vietā no 10 °C līdz 25 °C (istabas temperatūrā).