

Multi-Gyn® ActiGel

Wyrób medyczny



PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ UŻYWANIA I ZACHOWAJ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO WGLĄDU.

Wyrób medyczny Multi-Gyn ActiGel wspomaga łagodzenie objawów bakteryjnego zakażenia pochwy (BV)

- Redukuje nieprzyjemny zapach, nieprawidłową wydzielinę i swędzenie
- Zapewnia bezpośredni efekt łagodzący
- Oparty na naturalnych składnikach

Wskazanie

Doświadczasz nieprzyjemnych objawów związanych z bakteryjnym zakażeniem pochwy? To nic niezwykłego – zakażenie bakteryjne pochwy (BV) może wystąpić u każdej kobiety. Multi-Gyn ActiGel, którego skuteczność kliniczna została potwierdzona w łagodzeniu objawów bakteryjnego zakażenia pochwy, wykorzystuje kojącą formułę opartą na naturalnym kompleksie 2QR. Zapewnia bezpośredni efekt łagodzący i jest przeznaczony do redukcji dolegliwości związanych z bakteryjnym zakażeniem pochwy, takich jak nieprawidłowa wydzielina, nieprzyjemny, „rybi” zapach, swędzenie, podrażnienia, kłliwość, zaczerwienienie i bolesność. Kompleks 2QR chroni tkankę przed szkodliwymi bakteriami w bezpieczny i naturalny sposób. Multi-Gyn ActiGel zapewnia skuteczną ulgę.

Wyrób ten nie jest przeznaczony do leczenia chorób przenoszonych drogą płciową.

Jak działa Multi-Gyn ActiGel

Multi-Gyn ActiGel jest żelem o kwaśnym odczynie opartym na kompleksie 2QR. Ten naturalny składnik pochodzenia roślinnego posiada unikalną zdolność wspierania ochrony wrażliwych tkanek pochwy przed szkodliwymi bakteriami w bezpieczny i naturalny sposób. Multi-Gyn ActiGel wspomaga naturalne procesy regeneracyjne organizmu. Jest delikatny i wysoce skuteczny w łagodzeniu dolegliwości intymnych.

Zawartość opakowania

Tubka Multi-Gyn ActiGel 50 ml + aplikator + instrukcja użytkowania

Sposób użycia

- W przypadku objawów bakteryjnego zakażenia pochwy, takich jak nieprawidłowa wydzielina i/lub nieprzyjemny zapach stosować obfitą ilość wyrobu Multi-Gyn ActiGel dopochwowo co najmniej dwa razy dziennie przez co najmniej 7 kolejnych dni. Zalecane stosowanie jednej aplikacji rano i jednej przed snem.
- W przypadku dolegliwości intymnych, takich jak swędzenie i podrażnienia, stosować obfitą ilość wyrobu Multi-Gyn ActiGel co najmniej raz dziennie lub w razie potrzeby, aby uzyskać uczucie ulgi.

Wyrób Multi-Gyn ActiGel nie powinien być stosowany przez okres dłuższy niż 30 kolejnych dni.

Ostrzeżenie

Jeśli dolegliwości utrzymują się albo nawracają, należy skontaktować się z lekarzem.

Multi-Gyn ActiGel jest oparty na naturalnych składnikach

Wyrób Multi-Gyn ActiGel oparty jest na kompleksie 2QR*. Chroni tkankę i przed szkodliwymi bakteriami w bezpieczny i naturalny sposób. Nie zawiera substancji zapachowych, hormonów ani składników pochodzenia zwierzęcego.

Skład

Kompleks 2QR* (94%), guma ksantanowa, gliceryna, glikol kaprylowy, benzooesan sodu, kwas cytrynowy, sorbinian potasu, woda.

* Oczyszczony z ekstraktu liści *Aloe Barbadensis*

Wyrób ma średnie pH 4,1.

Informacje dotyczące alergii

Alergie na składniki wyrobu Multi-Gyn ActiGel występują bardzo rzadko. Nie należy stosować wyrobu Multi-Gyn ActiGel w przypadku alergii na którykolwiek z jego składników.

Działania niepożądane i przeciwwskazania

Wyrób Multi-Gyn ActiGel ma optymalną dla pochwy kwasowość (niskie pH) i może zmniejszać aktywność plemników, które mają odczyn zasadowy (wysokie pH). W związku z tym zaleca się, aby w przypadku planowania ciąży nie stosować wyrobu Multi-Gyn ActiGel w czasie owulacji.

Uwaga

Może wystąpić krótkotrwałe pieczenie lub mrowienie po zastosowaniu – jest to normalna reakcja i zwykle szybko ustępuje.

Interakcje z lekami

Nie są znane żadne interakcje z lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Nie są znane żadne przeciwwskazania do stosowania wyrobu Multi-Gyn ActiGel w okresie ciąży i karmienia piersią. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie z prezerwatywami i pessarami

Wyrób Multi-Gyn ActiGel nie powinien być stosowany jednocześnie z prezerwatywami. Wpływ na pessary nie jest znany.

Stosowanie z tamponami i irygatorami dopochwowymi

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania wyrobu Multi-Gyn ActiGel z tamponami i irygatorami dopochwowymi. Mogą one usuwać (część) wyrobu Multi-Gyn ActiGel z pochwy, tym samym osłabiając jego działanie.


Przechowywanie

Wyrób Multi-Gyn ActiGel należy przechowywać w temperaturze od 10°C do 25°C (temperatura pokojowa). Wyrób Multi-Gyn ActiGel należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy stosować wyrobu Multi-Gyn ActiGel po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.

Jak stosować Multi-Gyn ActiGel na zewnątrz i do wewnątrz

• Zastosowanie zewnętrzne

W przypadku dolegliwości zewnętrznych okolic intymnych (sromu) można nałożyć wyrób Multi-Gyn ActiGel palcem. Przed nałożeniem wyrobu należy zawsze umyć ręce.

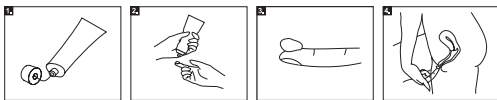


1. Odkręć zakrętkę tubki. Przed pierwszym użyciem przebij osłonę tubki tylną stroną zakrętki.
2. Chwyc tubkę jedną ręką i trzymaj palec wskazujący drugiej ręki blisko tubki, jak pokazano na rysunku. Delikatnie ściśnij tubkę, aż na palcu wskazującym znajdziesz się obfita ilość żelu, jak pokazano na rysunku.
3. Ilość żelu na palcu wskazującym powinna co najmniej pokrywać opuszek palca (ok. 2 ml).
4. Nałóż żel na zewnętrzne okolice intymne.

www.multi-gyn.com




• Zastosowanie wewnętrzne

W celu wprowadzenia żelu do pochwy pomocny może być specjalny aplikator dołączony do opakowania. Można go przykręcić do tubki. Po użyciu należy odkręcić aplikator z tubki i opłukać go ciepłą wodą. Aplikator można przechowywać oddzielnie albo umieścić go z powrotem na tubce i nałożyć zatyczkę. Jeśli wolisz, możesz wprowadzić żel palcem zamiast korzystać z aplikatora. Umyj ręce, wyciśnij na czubek palca wskazującego ilość żelu odpowiadającą co najmniej wielkości opuszki palca i wprowadź palec do pochwy.

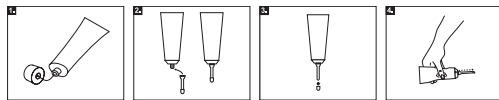

1. Odkręć zakrętkę tubki. Przed pierwszym użyciem przebij osłonę tubki tylną stroną zakrętki.
2. Nakręć na tubkę specjalny aplikator, znajdujący się w opakowaniu.
3. Zdejmij małą zatyczkę z aplikatora.
4. Chwyc tubkę jedną ręką i delikatnie ściśnij, aż żel będzie widoczny na końcu aplikatora. Oznacza to, że aplikator jest wypełniony żelą i gotowy do użycia. Sprawdź, jaka ilość żelu wydostaje się przy delikatnym ściśnięciu tuby; potrzebujesz ilości odpowiadającej co najmniej opuszcze palca (ok. 2 ml).

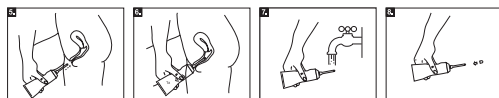

5. Wprowadź do pochwy aplikator nakręcony na tubkę, jak pokazano na rysunku. Aplikator jest krótszy niż pochwa i nie uszkodzi szyjki macicy.
6. Delikatnie ściśnij tubkę. Potrzebujesz ilości odpowiadającej co najmniej opuszcze palca, ale nie ma przeciwwskazań do zastosowania większej ilości.
7. Po użyciu możesz pozostawić aplikator na tubce i przepłukać go ciepłą wodą.
8. Nałóż małą zatyczkę na aplikator.

W przypadku poważnych zdarzeń należy poinformować producenta i właściwy organ krajowy w miejscu zamieszkania.

Utylizacja: Ten wyrób medyczny można utylizować razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Więcej informacji można znaleźć w przepisach prawa miejscowego.



BioClin BV, Blaak 555,
3011 GB Rotterdam,
Holandia

www.multi-gyn.com

Data aktualizacji: Grudzień 2025



2005711_1
7751379