

Wyrób medyczny Multi-Gyn FloraPlus łagodzi objawy grzybiczego zakażenia pochwy

- Łagodzi objawy grzybiczego zakażenia pochwy
- Przynosi skuteczną i szybką ulgę już po pierwszym zastosowaniu
- Przynosi ulgę w pieczeniu, swędzeniu i podrażnieniu
- Zmniejsza białe, grudkowate upławy
- Zawiera prebiotyki i kwas mlekowy
- Posiada pH optymalne dla zdrowej pochwy
- Skład oparty na naturalnych składnikach

Wskazania

Doświadczasz objawów grzybiczego zakażenia pochwy? Nie martw się - to powszechna dolegliwość. Multi-Gyn FloraPlus pomoże Ci uporać się z jej objawami w szybki i skuteczny sposób. Multi-Gyn FloraPlus łagodzi objawy grzybiczego zakażenia pochwy i związane z nimi dolegliwości, takie jak pieczenie, swędzenie, podrażnienie i białe, grudkowate upławy. Działa szybko - w badaniach klinicznych udowodniono, że zapewnia ulgę w ciągu 10 minut od pierwszego zastosowania! Multi-Gyn FloraPlus zawiera naturalny kompleks 2QR, kwas mlekowy i prebiotyki. Składniki te tworzą barierę ochronną na powierzchni błony śluzowej pochwy, która zabezpiecza ją przed kontaktem ze szkodliwymi bakteriami i drożdżakami. Wspierają również „dobre” bakterie kwasu mlekowego naturalnie występujące w pochwie. Dodatkowo mają korzystny wpływ na utrzymanie prawidłowej flory bakteryjnej pochwy. Żel ma optymalne pH charakterystyczne dla zdrowej flory bakteryjnej pochwy. Multi-Gyn FloraPlus jest łatwy w użyciu dzięki gotowemu do użycia, jednorazowym tubkom. Badanie kliniczne wykazało, że 100% użytkowniczek uznało opakowanie za praktyczne, a 98% oceniło jego aplikację jako łatwą. 95% uczestniczek badania zadeklarowało chęć kontynuowania stosowania produktu, a 93% poleciłoby Multi-Gyn FloraPlus innej kobiecie. Nie zawiera hormonów ani substancji zapachowych.

¹ Przynosi ulgę w przypadku pieczenia, swędzenia i podrażnienia w ciągu 10 minut od pierwszego zastosowania.

Jak działa Multi-Gyn FloraPlus

Multi-Gyn FloraPlus to żel na bazie naturalnego składnika - kompleksu 2QR pozyskiwanego z ekstraktu z liści Aloe Barbadensis. Tworzy fizyczną barierę ochronną na błonie śluzowej pochwy i chroni zdrową florę bakteryjną. Bariera ta zapobiega kontaktowi szkodliwych bakterii i drożdży z błoną śluzową i tkanką pochwy.

Zawartość opakowania

5 jednodawkowych tubek po 5 ml + instrukcja użycia.


Sposób użycia

W celu łagodzenia dolegliwości związanych z grzybiczym zakażeniem pochwy: zawartość 1 tubki aplikuj dopochwowo bezpośrednio przed snem przez kolejnych 5 dni.

Multi-Gyn FloraPlus nie należy stosować dłużej niż przez 30 kolejnych dni. Pozwoli to na samoregenerację flory bakteryjnej pochwy bez dodatkowego wspomagania.

Jak stosować Multi-Gyn FloraPlus

1. Przed użyciem strząśnij zawartość tubki w kierunku końca aplikatora.
2. Odłam końcówkę na aplikatorze przekraczając ją.
3. Delikatnie wprowadź cienki koniec aplikatora (tubki) do pochwy.
4. Delikatnie ściśnij tubkę, w celu wprowadzenia żelu do pochwy.
5. Kontynuuj ściskanie tubki podczas jej wysuwania.

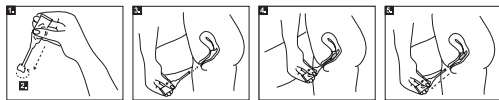

Uwaga: Tubka jest tak zaprojektowana, że aplikuje odpowiednią, zalecaną ilość żelu. Przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami niewielka ilość żelu pozostanie w tubce. Należy wyrzucić tubkę po użyciu.

Multi-Gyn FloraPlus ma postać żelu, który przeznaczony jest do bezpośredniej aplikacji do pochwy. Każda tubka zawiera pojedynczą dawkę produktu. Powyższe rysunki pokazują w jaki sposób używać pojedynczej tubki.

W przypadku jakiegokolwiek poważnego incydentu (spóstrzeżenia działania niepożądanego) należy poinformować producenta i właściwy organ krajowego państwa zamieszkania.

Ostrzeżenie

Jeśli dolegliwości utrzymują się lub nawracają, skontaktuj się z lekarzem.

Skład Multi-Gyn FloraPlus jest oparty na naturalnych składnikach

Multi-Gyn FloraPlus zawiera naturalny kompleks 2QR w połączeniu z prebiotykami. Ta unikalna formuła nie zawiera hormonów ani substancji zapachowych.

Składniki

Kompleks 2QR¹ (60%), benzoatan sodu, kwas cytrynowy, sorbinian potasu, woda, kwas mlekowy, gliceryna, lewulinian sodu, anizat sodu, wodorotlenek sodu, guma ksantanowa, fruktooligosacharydy (FOS), laktol, hydroksypropylometylceluloza, glikol kaprylowy.

¹ Pozyskiwany z ekstraktu z liści Aloe Barbadensis.

Informacje dla alergików

Alergie na składniki preparatu Multi-Gyn FloraPlus występują bardzo rzadko. Zrezygnuj ze stosowania preparatu Multi-Gyn FloraPlus w przypadku uczulenia na którykolwiek z jego składników.

Uwaga

Jeśli po zastosowaniu odczuwasz pieczenie i/lub mrowienie - nie martw się. Jest to normalne i szybko ustępuje. Uczucie pieczenia jest związane z przywróceniem naturalnego pH w pochwie.

Skutki uboczne i przeciwwskazania

Kobiety planujące ciążę powinny powstrzymać się od stosowania Multi-Gyn FloraPlus podczas owulacji. Multi-Gyn FloraPlus ma niskie pH (optymalne dla pochwy) i dlatego może zmniejszać aktywność nasienia, które ma odczyn zasadowy (wysokie pH).

Pamiętaj, że produkt ten nie leczy ani nie zapobiega chorobom przenoszonym drogą płciową.

Interferencja z lekami

Nie są znane żadne interakcje z lekami.

Ciąża i laktacja

Nie są znane żadne przeciwwskazania do stosowania Multi-Gyn FloraPlus w okresie ciąży i karmienia piersią. Porozmawiaj z lekarzem o wyborze postępowania odpowiedniego dla Ciebie.

Stosowanie z prezerwatywami i krążkami domacicznymi

Wpływ preparatu Multi-Gyn FloraPlus na krążek domaciczny i prezerwatywę nie jest znany.

Stosowanie z tamponami i irygacjami dopochwowymi

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania Multi-Gyn FloraPlus z tamponami i irygacjami dopochwowymi. Mogą one usunąć część Multi-Gyn FloraPlus z pochwy, a tym samym zmniejszyć skuteczność produktu.

Przechowywanie

Przechowuj Multi-Gyn FloraPlus w temperaturze od 10°C do 25°C. Multi-Gyn FloraPlus przechowywaj w sposób niedostępny dla dzieci. Nie stosuj produktu Multi-Gyn FloraPlus po upływie terminu ważności.

Informacje ogólne

Zdrową pochwę zamieszkują zróżnicowane bakterie pozostające we wzajemnej równowadze. Kiedy naturalne środowisko lub pH pochwy zostaje zakłócone szkodliwe bakterie lub drobnoustroje mogą się swobodnie namnażać. Zakłócenie tej równowagi jest często rozpoznawane poprzez zmianę wydzieliny z pochwy. Najczęściej dochodzi do tego w wyniku wzrostu flory bakteryjnej zwanego bakteryjnym zakażeniem pochwy (BV) lub grzybiczego zakażenia pochwy (Candida, drożdżycza). Bakteryjnemu zakażeniu pochwy towarzyszy nieprzyjemny „rybi” zapach, podczas gdy infekcjom grzybiczym pochwy towarzyszy swędzenie, pieczenie i grudkowata, biała wydzielina. Oba te problemy są łatwe do wyleczenia, dzięki czemu szybko możesz wrócić do zdrowia.

Utylizacja: Ten produkt może być utylizowany razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Więcej informacji można znaleźć w lokalnych przepisach.

Multi-Gyn FloraPlus jest wyrobem medycznym klasy 2b.